

機器セッティングマニュアル


使用機器は日立（Noblus）

機器の接続は画像通りに黄色の①から⑦まで同じ番号の場所へコードを接続してください。

2022/08/17 13:31

Img_7239.jpg

アプリで開く

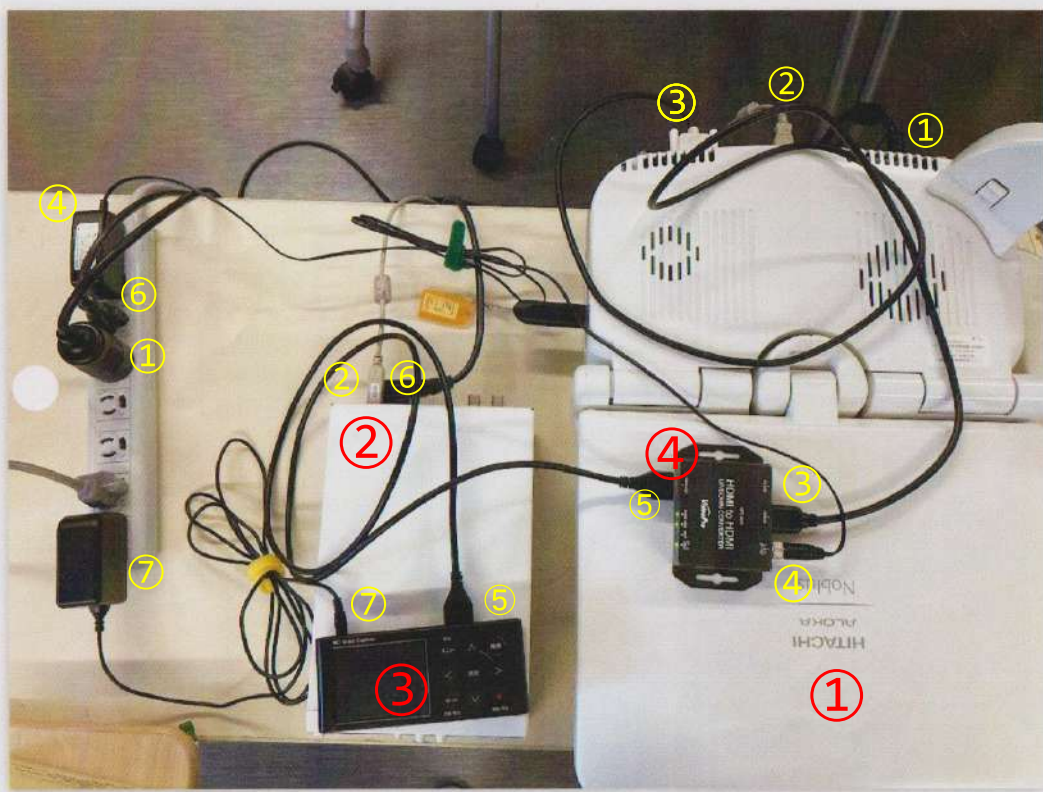

- ① 日立Noblus
- ② プリンター
- ③ 動画保存装置
- ④ 画像変換機

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>

1/1

注意事項

検査時は③の動画保存装置へUSBを挿入し検査を開始してください。

その時のUSBは腹部用と乳腺用がありそれぞれの検査でUSBを入れ替えてください。

録画は1検査ごとに開始と終了ボタンを押す

例) 乳腺と腹部がある場合

乳腺開始時に乳腺用USBを挿入し録画開始を押し検査終了時に停止を押す。


腹部開始時に乳腺用USBを外し腹部用を挿入し録画開始を押し検査終了時に停止を押す。

USBは乳腺動画用と腹部動画用と日立装置の静止画コピー用の3本あります。


機器背面の接続

- ①超音波装置電源 コンセントへ接続
- ②プリンターケーブル ②と②を接続
- ③画像変換ケーブル ③と③を接続
- ④動画変換装置から保存装置へ ④と④を接続

2022/08/17 13:30

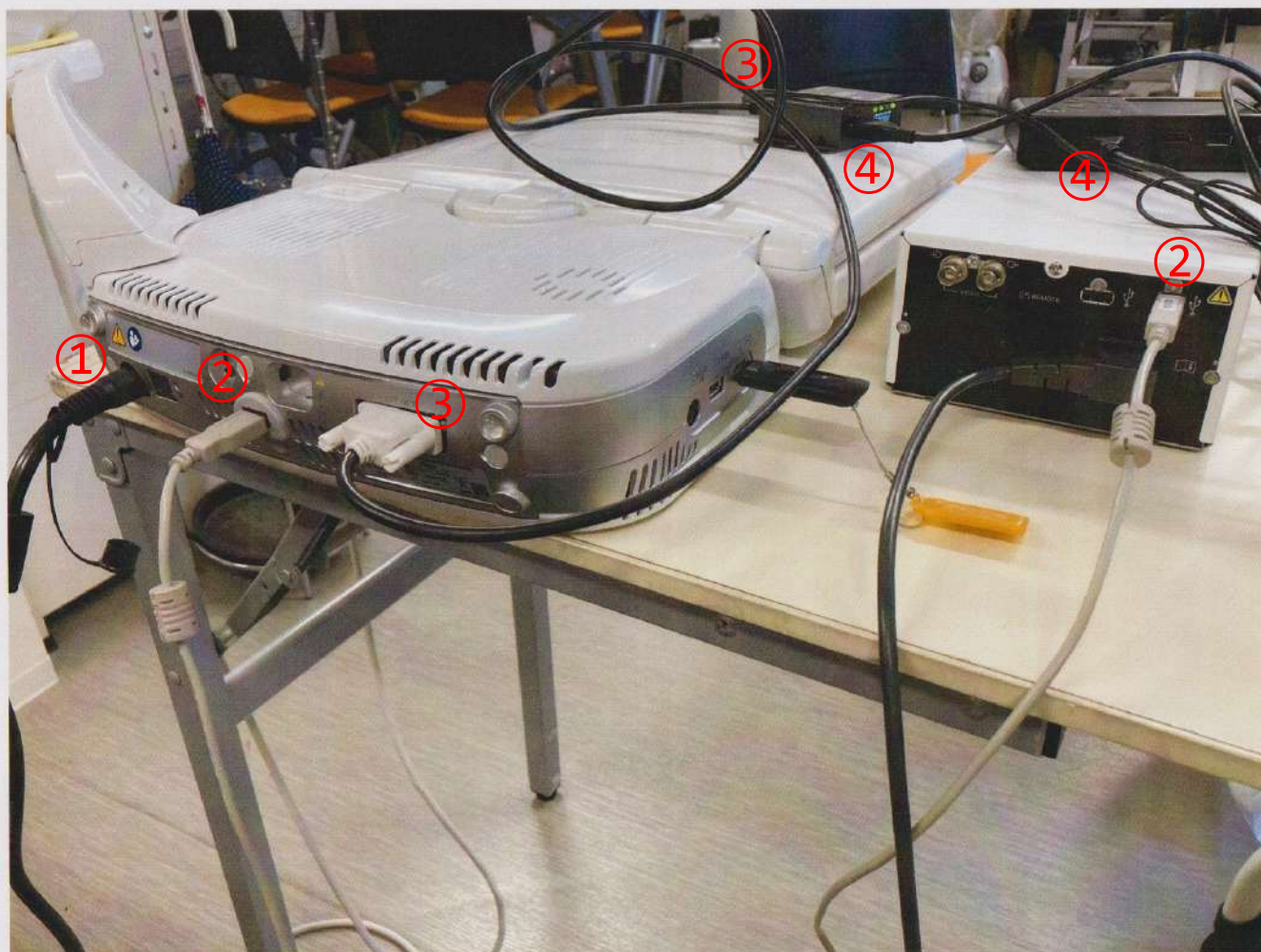

①被検者IDに受診票の受診番号を入力

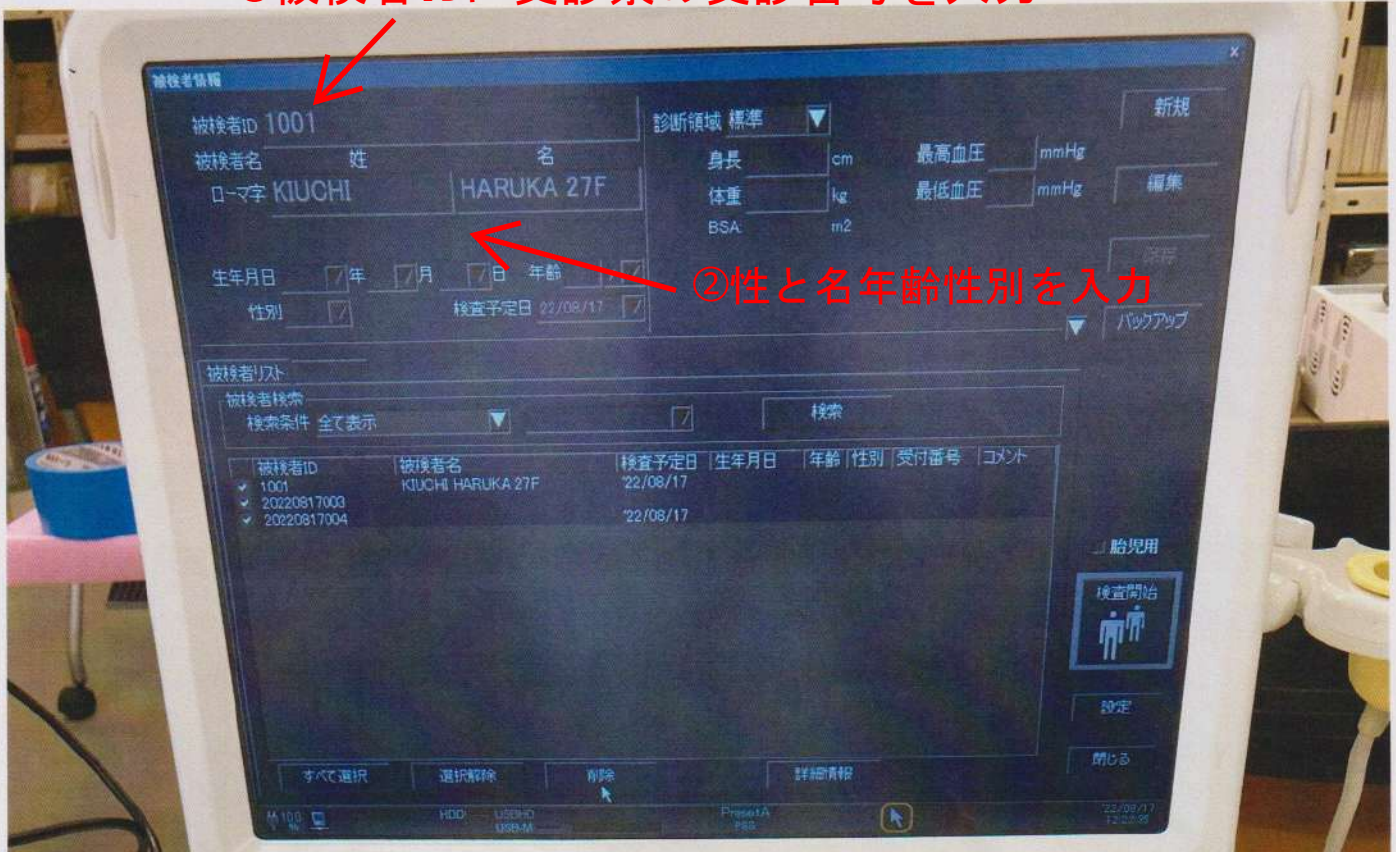

②性と名年齢性別を入力

検査開始時

動画録画機へそれぞれの検査用USBを挿入し開始ボタンを押し検査を開始すること。終了後は停止ボタンを忘れずに押す



③撮影はREC1でプリント

REC2でHDへ保存
両方押すこと

REC1「白黒プリント」とREC2「ハードディスク保存」を両方押してください。

検査時は③の動画保存装置へUSBを挿入し検査を開始してください。

その時のUSBは腹部用と乳腺用がありそれぞれの検査でUSBを入れ替えてください。



< 検査終了後 >

- 1、検査終了後「被検者情報」の画面を右下「閉じる」で閉じてください。
- 2、フリーズした後「読み出し」を押してください。
- 3、「検索条件」→「今日の検査」場所→「ハードディスク」で検索すると今日のすべての画像が出る。

エコーUSB を本体に刺し、左下の「すべて選択」→「コピー」

※「すべて選択」で画像の枚数が出るので覚えておいてください。

- 4、ポップアップが出るので「転送先」→「USB メモリ」→「OK」で画像をエコーUSB にコピーする。

一番下「転送中」の青いラインが消えたら転送終了。

転送終了後「場所」→「USB」→「すべて選択」で USB 内の画像枚数が出るので、同じ枚数が転送されたか確認する。

- 5、すべて終了したら右下の「閉じる」を押した後 USB を抜いてください。閉じる前に抜くとエラーが出ることもある。

患者データのみの
消去



終了後、患者属性データのみ消去し画像は消さないこと